



Tento stručný návod k použití obsahuje informace pro první nastavení čtečky epoc Reader. Úplné pokyny pro uživatele viz návod k obsluze systému epoc.

## Obsah balení

- Čtečka epoc Reader
- Sítový napájecí adaptér
- List se štítky
- List s čírymi chrániči štítků

## Součásti čtečky epoc Reader

Obrázek dole ukazuje základní součásti čtečky a světelné indikátory stavu.



Tento stručný návod k použití obsahuje informace pro první nastavení čtečky epoc Reader. Úplné pokyny pro uživatele viz návod k obsluze systému epoc.

## Obsah balení

- Čtečka epoc Reader
- Sítový napájecí adaptér
- List se štítky
- List s čírymi chrániči štítků

## Součásti čtečky epoc Reader

Obrázek dole ukazuje základní součásti čtečky a světelné indikátory stavu.




## Před použitím

### Krok 1: Nabití

Před použitím čtečky epoc Reader nabijte její baterii podle následujících pokynů:

1. Zkontrolujte, zda je čtečka Reader vypnutá. Pokud indikátor tlačítka napájení svítí zeleně, vypněte čtečku Reader stisknutím a podržením tlačítka napájení nejméně po dobu tří sekund.
2. Připojte síťový adaptér k síťové zásuvce.
3. Připojte síťový adaptér k napájecí zásuvce na zadní straně čtečky Reader.
  - Žlutý indikátor stavu baterie začne blikat.
  - Po úplném nabití baterie žlutý indikátor stavu baterie přestane blikat.

Poznámka: První nabití trvá zhruba čtyři hodiny.

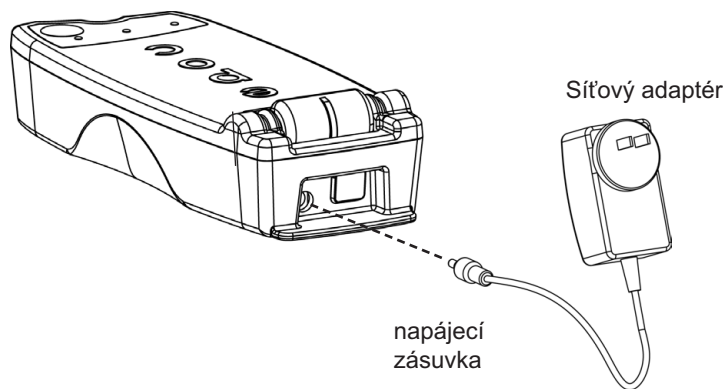

### Krok 2: Označení štítkem

Označte čtečku epoc Reader štítkem pro snazší odlišení od jiných čteček v zařízení. Použijte přiložené štítky a pro prodloužení jejich životnosti je přešlepte čirými chrániči.

**Poznámka: Před uvedením jednotky do provozu nahlédněte do vnitřních postupů kontroly kvality daného zařízení a požadavků stanovených předpisy.**


## Před použitím

### Krok 1: Nabití

Před použitím čtečky epoc Reader nabijte její baterii podle následujících pokynů:

1. Zkontrolujte, zda je čtečka Reader vypnutá. Pokud indikátor tlačítka napájení svítí zeleně, vypněte čtečku Reader stisknutím a podržením tlačítka napájení nejméně po dobu tří sekund.
2. Připojte síťový adaptér k síťové zásuvce.
3. Připojte síťový adaptér k napájecí zásuvce na zadní straně čtečky Reader.
  - Žlutý indikátor stavu baterie začne blikat.
  - Po úplném nabití baterie žlutý indikátor stavu baterie přestane blikat.

Poznámka: První nabití trvá zhruba čtyři hodiny.

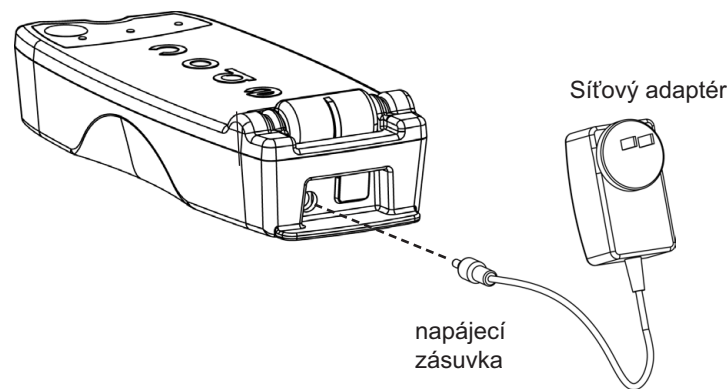

### Krok 2: Označení štítkem

Označte čtečku epoc Reader štítkem pro snazší odlišení od jiných čteček v zařízení. Použijte přiložené štítky a pro prodloužení jejich životnosti je přešlepte čirými chrániči.

**Poznámka: Před uvedením jednotky do provozu nahlédněte do vnitřních postupů kontroly kvality daného zařízení a požadavků stanovených předpisy.**